

RedVac® Vacuum Madrass

Bruksanvisning



Hensikt :

RedVac vakuummadrassen brukes til å fiksure og immobilisere pasienter som mistenkes for å ha brudd i ryggraden og skadede eller ødelagte ekstremiteter. Madrassen er begrenset til preklinisk assistanse og første fase av klinisk støtte. Red Vac® vakuummadrasser er ikke egnet for permanent immobilisering slik tilfellet er med et plaster. Åpne sår steriliseres og dekkes før påføring av vakuummadrassen i henhold til nyere standarder for aseptisk sårbehandling.

Applikasjon:

RedVac vacuum madrass er et medisinsk produkt som kan påføres av medisinsk fagfolk som er instruert, og som har regelmessig opplæring på produktet. Den slags program er i samsvar med den til en hver tid gjeldende, almente anerkjente medisinske retningslinje og anbefalinger.

- Behandle åpne sår og ikke intakte hudområder i samsvar med gjeldende anbefalinger fra aseptisk behandling og gi et sterilt dekke.
- Flytting av pasienten bør utføres med tilstrekkelig hjelpemiddel (f.eks ryggbåre) i samsvar med gjeldende anbefalinger.
- Husk alltid å fiksure og forme vacuum madrassen når pasienten er lagt i denne, samtidig som du suger ut luft av vakuummadrassen.
- Hvis pasienten skal flyttes med vakuummadrassen husk å sette beltene godt på, lukke belter og stramme stropper slik at du er sikker på at pasienten er festet forsvarlig.
- For å ta ut luft av vacuum madrassen skal ventilen være lukket. Sugelangen av pumpen med tilhørende adapter plasseres direkte på sugeventilen og luften tappes ut av madrassen. Etter å ha nådd tilstrekkelig stabilitet av vakuummadrassen, fjernes sugelangen fra ventilen
- Sjekk at beltene ligger rett og tett inntil pasienten slik at det er komfortabelt.

Rengjøring og pleie/desinfisering:

Vakuummadrassen kan rengjøres med vann og vaskemiddel. En ekstrem mekanisk rengjøring som kan skade overflatematerialet må unngås. Desinfiser utelukkende ved hjelp av alkohol-baserte (etanol/propanol) desinfeksjonsmidler. Godkjent for å bruke vircon, saniswiss våtservietter og lifeClean. Ikke bruk løsemiddel. Etter rengjøring av vakuummadrassen skal den tørkes forsiktig





Godkjente desinfeksjonsmidler - REDVAC

application	Product name	Supplier	Inhalants	Suitable
Surface disinfection	Descogen liquid	Antiseptika	Peroxide compound	According to manufacturer
Surface disinfection	Incidin Pro	Ecolab	QAV + Phenoxyethanol	According to manufacturer
Surface disinfection	Incidin liquid	Ecolab	Alcohols	According to manufacturer
Surface disinfection	Incidin Active	Ecolab	Peroxide compound	According to manufacturer
Surface disinfection	TPH protect	Schülke+	QAV + Amine	According to manufacturer
Surface disinfection	Mikrozid AF liquid	Schülke+	Alcohols	According to manufacturer
Surface disinfection	Acryl Des	Schülke+	QAV – non Alcohols	According to manufacturer
Surface disinfection	Perform	Schülke+	Peroxide compound	According to manufacturer

Oppbevaring:

Vakuummadrassen skal lagres under tørre forhold.

Gjenbruk: Produktet kan brukes igjen dersom materialet er uskadd og dens funksjon er bevart. Før neste bruk, må madrassen kontrolleres at den er i riktig stand. Kun produkter med perfekt teknisk- og hygienisk tilstand kan gjenbrukes.

 Kohlbrat & Bunz GmbH, Loretostrasse 4-8, A-5550 Radstadt / Austria, www.RedVac.com	Basic UDI-DI / GMN: 9010710RedVac9K
  Bruk dette medisinske utstyret kun med tilbehør eller reservedeler som er godkjent av produsenten	instructions in the current edition online 

Innholdet i denne bruksanvisningen er beskyttet av opphavsrett. Enhver bruk, herunder ekstrakter, skal kreve skriftlig godkjenning. Med forbehold om teknisk endring. Patentsøkt.

Issue 01-2021

Rev. 28.10.2021

RedVac® Vacuum Madrass Bruksanvisning



RedVac® Vakuummadrass Vedlegg til bruksanvisningen



Denne beskrivelsen er et tillegg til bruksanvisningen for vakuummadrassen. Den er kun ment som en illustrerende beskrivelse av bruken.

Metoden for bruk følger de gjeldende, allment aksepterte medisinske retningslinjene og anbefalingene fra de relevante faglige foreningene.

#1 Pleie av pasienten – i henhold til retningslinjene	#2 Omlegging av pasienten
#3 Forflytning av pasienten	#4 Festing og tilpasning
#5 Utsuging og tilpasning	

RedVac® Vacuum Madrass Bruksanvisning




Pakking av VakummadrassbaggTM01 med pumpe , lappesaker og ekstra belter



RedVac® Vacuum Madrass Bruksanvisning



Ventil, Hempe og Adapter

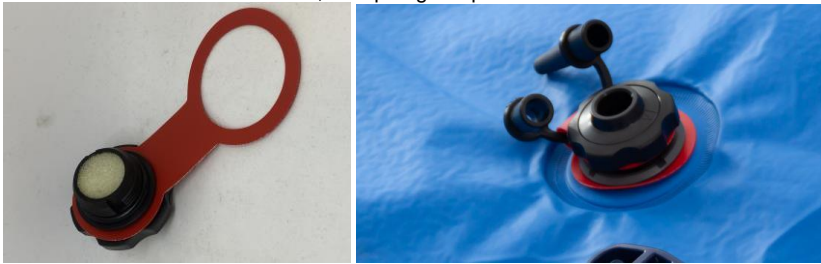

Ventilen består av 3 deler.
Ventilen som skrues inn i
vakummadrassen
Hempen som sikrer ventil fra å
falle av/forsvinne
Adapter som muliggjør
alternativ sug feks. el-sug fra
ambulansen

Bruk av ventil og pumper



Beltet på Bagg til Vakummadrass

