


Innhold reparasjonssett, Art.nr. 9022:

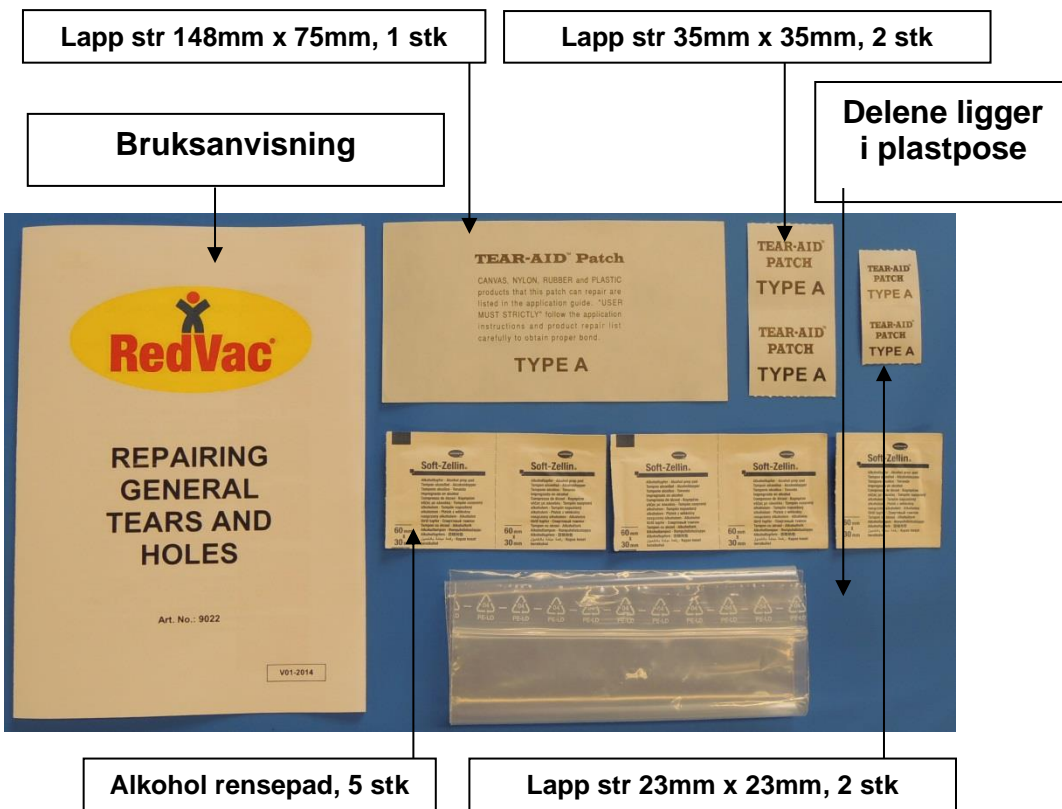

REPARERE GENERELLE RIFTER OG HULL



Kohlbrat & Bunz GmbH
Loretostrasse 4-8
A-5550 Radstadt
Austria

P: +43 6452 7193 0

F: +43 6452 7193 51

E: office@kohlbrat-bunz.com www.RedVac.com

BESTILLING AV LAPPESETT OG VENTILDELER

Emergency care as

innkjop@emergency-care.com

tlf 33387713 /46425888

oppgi. avtalennummer 38159101

Art. Nr.: 9022

V01-2014

PÅFØRINGSINSTRUKSJON:

Lappesaker A - Tear-Aid reparasjon av PU-madrass, splinter og frigjøringsenheter

1. For best resultat, må overflaten være ren og tørr. Overflatetemperatur på produktet som skal repareres bør være +10 ° C eller høyere.
2. Rengjør overflaten som skal repareres med alkohol prep pad, eller en 50-50 blanding av isopropanol (isopropyl) og vann. **Før du fortsetter må du kontrollere at overflaten er tørr.**
3. **SKJÆRE:** Skjær til lappen slik at den er 2,5 cm utenfor området som er revnet eller større enn hullet. Hvis du bruker mer enn en lapp, påse at de overlappes med minst 2,5cm. Kutt til hjørnene slik at de blir avrundet.
4. **SKRELLE:** pill forsiktig av 1cm papiret bak på lappen. Riv av papiret mens du strekker kanten av lappen, dette vil bidra til å skille duken fra lappen - spesielt når plasteret har blitt kuttet i til mindre størrelse.
5. **FESTE:** Posisjon og anker utsatt 1cm kant - slik at lappen å forlenge 2,5 cm utover alle kanter av tåre. Trekk sakte duken mens nøye påføre lappen over tåre – vær nøye for å unngå luftbobler. Gni alle kanter for å forsegle. Gni hele lappen aggressivt. Reparasjonen er fullført.

Lokaliser det ødelagte stedet



Vask med alkohol prep pad



Klipp lappen i riktig størrelse



Fest lappen på riktig posisjon og pill av papiret til lappen



Gni lappen aggressivt



Reparasjonen er utført

